

UN DEFIBRILLATEUR A ETE INSTALLE SUR LA FACADE DU BATIMENT TY AN OLL (Bibliothèque).



Chacun peut être amené à s'en servir... Il peut sauver une vie !

Voici donc sa notice que nous vous invitons à lire et à conserver !

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES



Mettez nu le thorax.
Nettoyez et séchez la peau, au besoin.

Pour commencer : Tirez la poignée.
Retirez les protections.

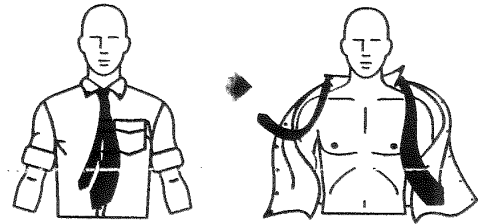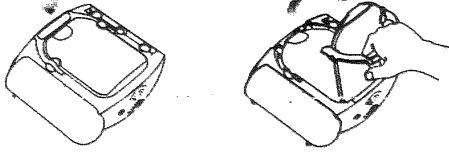


Décolliez la pellicule adhésive et sortez les électrodes de la cartouche.


Décolliez chaque électrode du revêtement jaune en plastique.

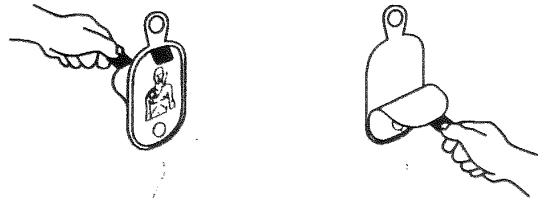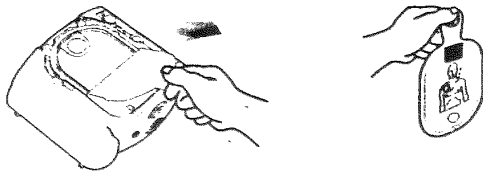


Placez les électrodes exactement conformément à l'illustration.

Analyse ... Ne touchez pas le patient!


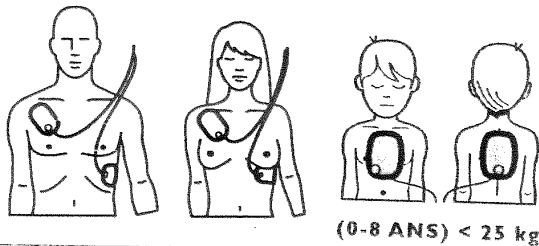


Attendez que  s'arrête de clignoter

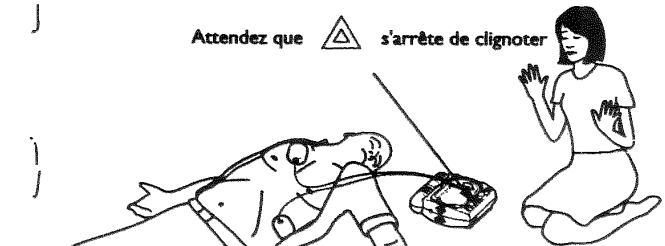

Pour délivrer un choc : appuyez sur le bouton ORANGE clignotant. Ne touchez pas le patient.

Pour l'aide à la RCP : appuyez sur le bouton clignotant.

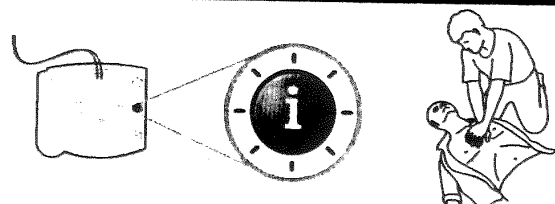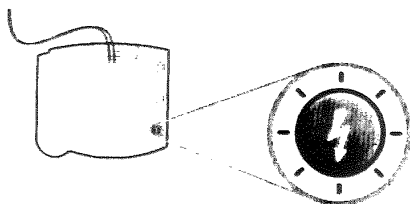

30 compressions • pincez le nez, penchez la tête • 2 inspirations complètes

Pour mettre l'appareil sous tension : appuyez sur le bouton VERT de Marche/Arrêt.

Si la cartouche a besoin d'être remplacée : faites glisser le loquet.

